



EBOLA, MERS ve diğer Viral enfeksiyon riskli hastaların Bulunduğu Ambulans ve Odaların Dezenfeksiyon Prosedürü

Ebola, MERS ve diğer viral enfeksiyonlar ile karşılaşma şüphesi bulunduğu anda; personelin doğru korunması, yüzeylerin doğru temizlenmesi ve ortamdaki bulaşma riskinin minimum düzeye indirilmesi gerekmektedir.

Temas edilen yüzeylerde bu özeni göstermek esas olmakla beraber, odaya giren personel/insan sayısını da azaltmak önemlidir.

Homojen bir dezenfeksiyon yapmak için HyPro Technical 7% solüsyonun Hyspray cihazıyla kullanılması personele ve bir sonraki hasta girişinde bulaşma riskini en aza indirmek için önemle tavsiye edilir. Bu uygulamada; pulverizasyon yöntemi ile kuru hava şeklinde, mikro yayılma sayesinde, tüm yüzeylere ulaşan dezenfektan hızlı ve etkin bir temizleme işlemi yapar. Ortamda bulunan tüm objeler herhangi bir zarar görmeden dezenfekte olur. Bu işlem sonrasında ilave bir uygulama yapmaz gerekir.

Günlük temizlik için, %3 HyPro Medical ürününün kullanılması dezenfeksiyon işlemi daha kalıcı hale getirir. Temizlenecek kısımlara spreyleme yapılması ile 1 dakika içerisinde etki gösterir. Bekleme süresi sonunda microfiber bez ile işlem tamamlanır.

