


Profid Tümör İşaretleme İğnesi, tek lümenli bir iğne olup, özgün tasarım ergonomik özel bir sap dizaynına sahiptir ve distal ucuna altın marker yüklenmiş olarak kullanıcıya sunulur. Tümör lezyonlarının radyasyon terapi ve/veya cerrahi girişim öncesi işaretlenmesi için kullanılır. Altın tümör markırları tümör lezyonuna yerleştirilerek, radyasyon tedavisinin belirli bir hedef bölgeye uygulanabilmesi için radyolojik işaretlemeye yardımcı olur. Günümüzde, Girişimsel Radyoloji'nin sıklıkla başvurduğu bir uygulamadır. Profid, kullanıcı görüşleri doğrultusunda üretilmiş özel bir işaretleme iğnesidir. İşaretleyici ucun hedefe kolayca yerleştirilmesi için, özel mekanizma bulunan bir sap dizayn edilmiştir. Parmak ile itme hareketi yaparak kullanıcı tarafından güvenli bir şekilde işlem tamamlanır.



- İşaretleyici markır saf altından imal edilmektedir (%99.9)
- Altın markır üzerindeki özel tırtıklı yapısı sayesinde immigration kısıtlanır
- BT ve MRI altında yüksek visibilite sağlar
- Çeşitli boyutlarda üretilebilmektedir (17G-18G-19G and 15cm-20cm-25cm)

Figür.1 Emniyet piminin çıkarılması

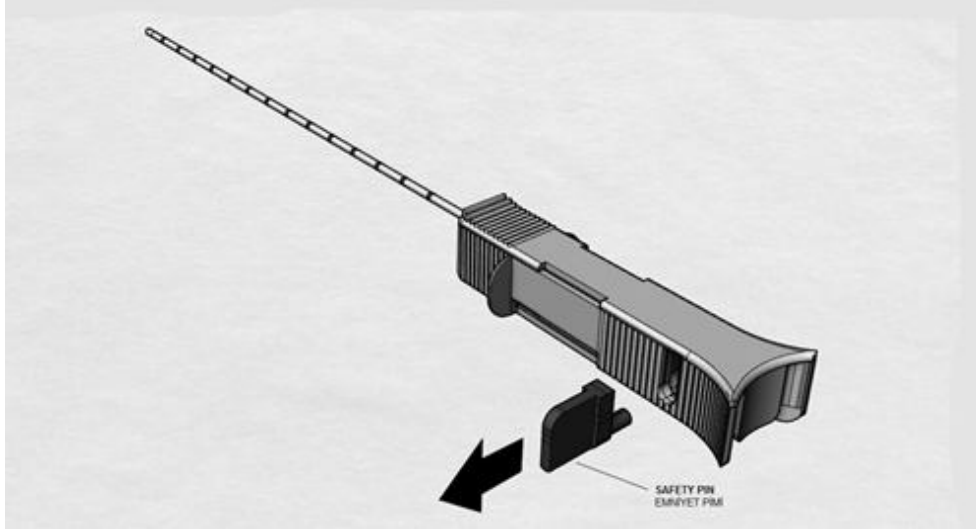

Figür.2 Uç kısmındaki hareketli parçanın ileri itilerek altın işaretleyicinin yerleştirilmesi

